



sorbact®

green wound healing

Bakterie- og svampebindende meche

Produktbeskrivelse

Sorbact Meche er en steril, bakterie- og svampebindende meche lavet af finmasket bomuldsvæv. Mechen er velegnet til at anvende ved svampeinfektioner på huden, i fistelgange og i meget væskende, dybe sår.

Brugsanvisning

Svampeinfektion

Ved større hudfolder anvendes en af de brede mecher, mens de smalle mecher f.eks. anvendes mellem tæer.

Fiksér med BH/undertøj eller hudvenlig tape.

Forbindingsskift: 1 gang dagligt.

Væskende, dybe sår og fistelgange

Fyld hullet/gangen med mechen (pak ikke).

Tildæk med en væskeabsorberende forbinding. Bemærk, at der kan være løse tråde, hvis man har klippet i mechen. Sørg for, at den tilklippede ende altid er uden for indgangshullet.

Afhængigt af mængden af ekssudat udskiftes mechen fra en gang dagligt til 2 gange ugentligt.



Indikation

Svampeinfektioner og meget væskende sår, hvor man ønsker at rense for mikroorganismer f.eks.:

- Svampeinfektion mellem tæer og i hudfolder
- Bylder, fistelgange
- Tryksår, bensår, fodsår

Fordele

- Bakterie- og svampebindende
- Nem af anvende
- Ingen risiko for resistensudvikling
- Der er ikke behov for salve/creme ved svampebehandling

Produkt	Varenr.	Størrelse	Antal pr. æske/kolli
Meche	98118	1 x 50 cm	20 / 120
Meche	98121	2 x 50 cm	20 / 120
Meche	98120	5 x 200 cm	10 / 60
Meche	98119	10 x 200 cm	10 / 60

